



TOIVO



RoHS



TOIVO

Dementieklok

Handleiding | User Manual

GS1: 8720589320017
Modelnummer: KL-22



***-Lees de instructies en bewaar de goed-
-Read the manual and preserve it-***

Inhoudsopgave

Intro	4
Veiligheidsvoorschriften & Disclaimers	5
Onderhoud	7
<i>Algemene informatie</i>	7
<i>Inhoud</i>	7
<i>Opslag</i>	8
<i>Recycling - Weggooien</i>	8
<i>Service</i>	8
<i>Ontvangen en verzending</i>	8
<i>Garantie</i>	8
<i>Disclaimer</i>	9
Specificaties & Gebruiksaanwijzingen	10
<i>Gebruiksaanwijzingen</i>	10
<i>Technische Specificaties</i>	14
Contact	15

Intro

Bedankt voor uw vertrouwen in TOIVO! TOIVO is een merk dat alleen producten verkoopt die in Europa gemaakt zijn, hierdoor kunnen wij van TOIVO een optimale prijs/kwaliteit leveren en bent u verzekerd van onze 100% kwaliteitsgarantie.

Veiligheidsvoorschriften & Disclaimers

Let op: Lees voor gebruik onderstaande disclaimer goed door!

Algemeen | Personen & Gebruik | Elektra | Toelichting

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het apparaat, dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat de netspanning, die staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
- Steek de adapter alleen in het stopcontact als het toestel uitgeschakeld is.
- Gebruik alleen de bij de TOIVO dementieklok bijgeleverde adapter.
- Houd voeding, kabel en toestel uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen. Dit kan resulteren in een beschadigde accu en dit kan ook brandgevaar creëren.
- Raak het netgedeelte nooit aan als u in het water staat en raak de stekker altijd met droge handen aan.
- Raakt nooit een apparaat aan dat in het water gevallen is. Trek onmiddellijk de stekker of de voeding uit het stopcontact.
- Het toestel moet zo worden aangesloten dat de stekker vrij bereikbaar is.
- Trek nooit aan het snoer, maar aan de adapter om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Draag, trek of draai het toestel niet aan de kabel of aan de adapter.
- Als het snoer of de adapter beschadigd is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mogen deze onderdelen alleen worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst. Om risico's te vermijden, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.
- Let erop dat de kabels niet tot struikelval worden. Ze mogen niet worden geknikt, noch gekneld noch verdraaid.
- De accu kan en mag niet zelf worden vervangen of gedemonteerd. Als de accu ondeskundig wordt verwisseld, kan hij exploderen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type accu. Ga

naar een gespecialiseerde reparateur of ons servicecenter wanneer de accu defect is. Het artikel bevat een lithium-ion accu. Die mag niet worden gedemonteerd of in aanraking komen met open vuur en kortsluiting moet worden voorkomen

- Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Gebruik het toestel niet ter ondersteuning of vervanging van medische toepassingen.
- Controleer adapter, kabel en demontieklok voor elk gebruik zorgvuldig op schade. Een defect toestel mag niet in gebruik worden genomen.
- Gebruik het toestel niet als er schade aan toestel of kabel zichtbaar is, als het toestel niet perfect functioneert, als het gevallen of vochtig geworden is. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling bij gebruik van het apparaat
- Leg een elektrisch apparaat niet op een plaats, vanwaar het in bad of in de wastafel kan vallen.
- Gebruik het apparaat alleen als bedoeld in deze handleiding.
- Als u het toestel aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt uw recht op garantie.
- Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, d.w.z. zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.
- Leg of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een elektrische kachel of andere warmtebronnen.
- Vermijdt het contact van het apparaat met puntige of scherpe voorwerpen.
- Bedek het toestel niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen geval onder dekens of kussens. Er bestaat gevaar voor brand, elektrische schok en verwonding.
- Gebruik geen tijdschakelaars of externe afstandsbedieningen om het apparaat te bedienen.
- Gebruik het apparaat niet bij nevel uit spuitbussen of bij gelijktijdig gebruik van zuurstof.

Bij problemen, vragen of twijfels van het artikel, dient er direct contact opgenomen te worden met de betreffende leverancier op info@toivo.nl

Onderhoud

Algemene informatie

Het toestel is onderhoudsvrij. Mocht er zich toch ooit een storing voordoen, controleer alleen of de adapter naar behoren aangesloten is. Open de achterklep niet. Daarachter zitten geen onderdelen die de gebruiker moet schoonmaken of onderhouden. Dit dient enkel door een productspecialist bekeken te worden.

U mag aan het apparaat enkel reinigingswerkzaamheden uitvoeren. In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw vak handelaar en laat reparaties alleen door een erkend reparatiecentrum uitvoeren om risico's te vermijden.

Dompel het instrument niet onder in water of andere vloeistoffen.

Indien er toch per ongeluk vocht in het instrument is binnengedrongen, koppel dan onmiddellijk het netsnoer los van de wandcontactdoos.


Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet onder supervisie staan.

Inhoud

1. Artikel: TOIVO Dementieklok | Model: KL22 | Code:

2. Bijgevoegde benodigdheden:

- 1 x Dementieklok
- 1 x Handleiding
- 1 x Universele Adapter
- 1 x Afstandsbediening
- 1 x Opzetstuk

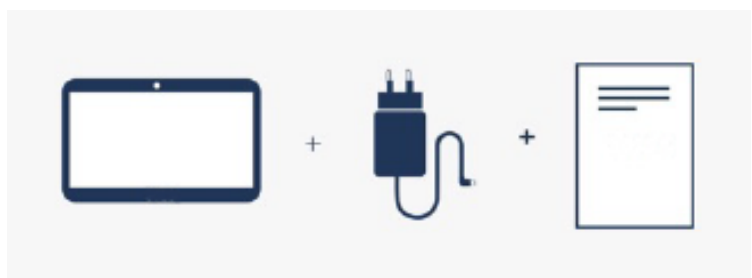

Controleer voordat u verder gaat naar het installatieproces of alle benodigde onderdelen in de doos aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, stuur dan een mail naar onze klantenservice: info@toivo.nl

Opslag

Bewaar de TOIVO dementieklok op een droge, schone en veilige plek. Buiten bereik van kinderen en/of dieren. Bewaar het apparaat niet op stoffige plekken en niet bij extreem lage of hoge temperatuur.

Recycling - Weggooien

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het dagelijks vuil! Het apparaat dient ingeleverd te worden bij een door de overheid aangewezen inzamel/milieupunt om het apparaat en de lithium-ion batterij goed te recyclen. Bij schade of slijtage van het product dient er een elektronisch specialist naar te kijken of dient het artikel teruggestuurd te worden naar de verkoper. Gooi elektronische apparaten nooit zomaar weg!

Service

Indien er behoefte is aan een gewenste service omtrent de handleiding, het product of de werking ervan, neem dan contact op met de klantenservice per email info@toivo.nl of per telefoonnummer: +800 333 666 9.

Openingstijden:

Ma T/M Vr: 09:00 – 17:00

Zaterdag: Gesloten

Zondag: Gesloten

Ontvangen en verzending

Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de bijbehorende pakbon op moment van ontvangst. Licht de leverancier/verkoper in wanneer er onderdelen missen, schade of klachten zijn over het product. Dien een gedetailleerde beschrijving in bij de verkoper en bewaar eventuele beschadigde onderdelen ter onderbouwing.

Garantie

TOIVO verleent standaard 1 jaar garantie (Vanaf aankoopdatum) op het aangekochte artikel. De consument dient nog een aankoopbewijs in bezit te hebben om in aanmerking te komen voor de vastgestelde garantie en

binnen een jaar na aankoopdatum per email of telefoon te bevestigen hier gebruik te van willen maken. Let op de garantie geldt *niet* bij de volgende punten: schade door onjuist gebruik en/of reparatie van het product; slijtage aan onderdelen; gebreken waarbij de klant op de hoogte van was bij de aankoop; schade door derden; Defecten door toedoen van consument zelf.



Disclaimer

TOIVO is gemachtigd zonder enige instructies om de specificaties, design en werking van het apparaat te wijzigen bij het uitbrengen van een verder ontwikkeld model. Consument kan geen aanspraak maken op vergoeding of geld terug garantie. Ook prijsvariatie en/of wijzigingen zijn niet verhaalbaar.

Specificaties & Gebruiksaanwijzing

Let op: De dementieklok kan met zowel de afstandsbediening, als met de knoppen op de achterkant bediend worden. Het is belangrijk dat u de juiste taal instelt en rekening houdt met de wisselende zomer- en wintertijd.

Gebruiksaanwijzing

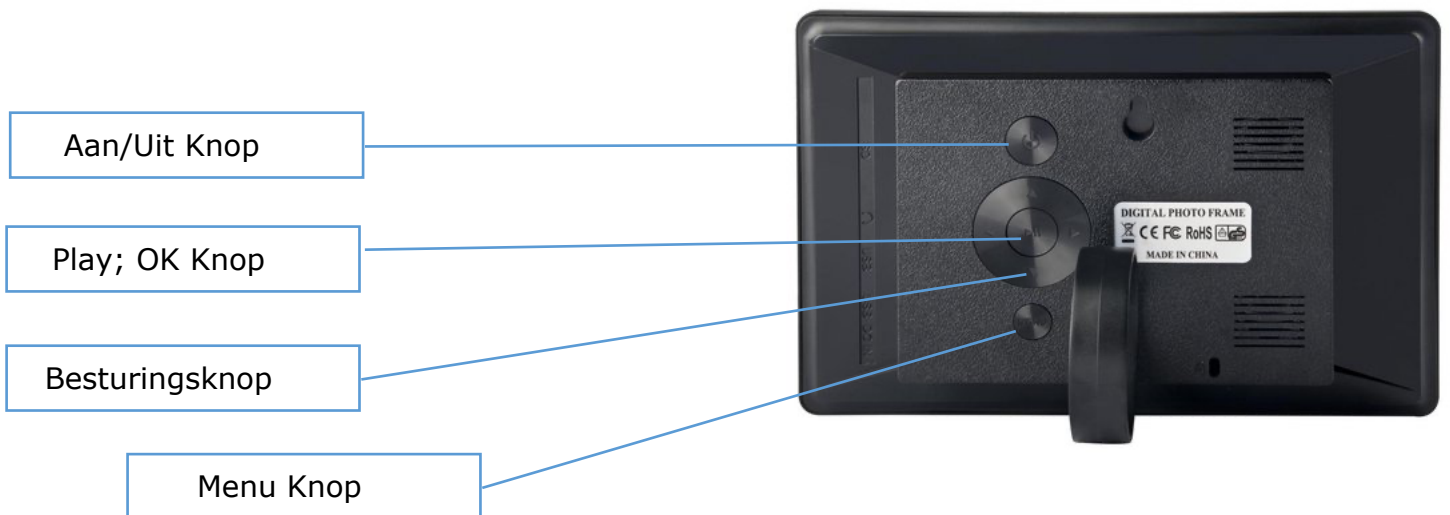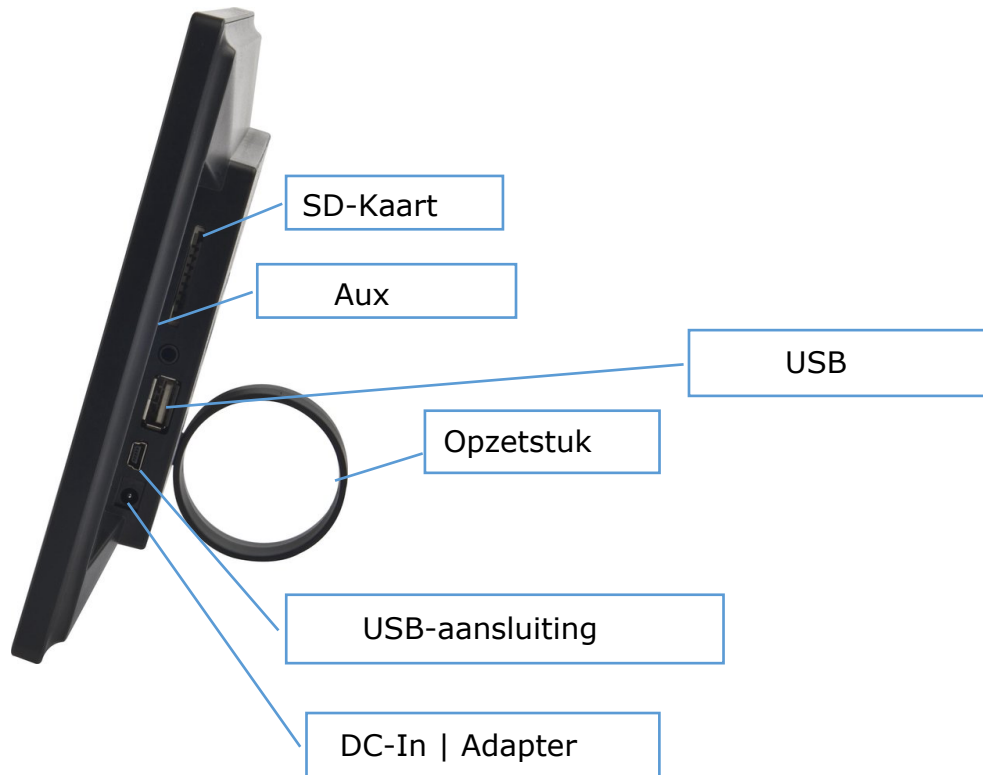

- **SD-Kaart:** Hier kunt u een eigen SD-Kaart plaatsen voor foto's.
- **Aux:** Hier kunt u een koptelefoon op aan sluiten, zodat het geluid van de klok herleid wordt.
- **USB-Aansluiting:** Hier kunt u 2 verschillende soorten USB aansluiten.
- **Opzetstuk:** Het opzetstuk kan simpelweg aan de achterkant bevestigd worden, zodat de klok rechtop blijft staan.
- **DC-In; Adapter:** Hier kunt u de adapter aansluiten de klok van stroom voorzien.
- **Aan/Uit knop:** Hiermee zet u het apparaat aan of uit.
- **Play; OK-knop:** Hiermee bevestigt u uw keuze in het menu.
- **Besturingsknop:** Hiermee kunt u wisselen in de mogelijke keuzes.
- **Menu knop:** Hiermee opent u het menu.

Menu Scherm:

Taalinstellingen	Hier kunt u de gewenste taal instellen.
Tijd Instellingen	Hier kunt u de tijd wijzigen. Deze staat bij aanschaf al goed ingesteld. Let op: De winter- en zomertijd wordt <i>niet</i> automatisch aangepast!
Datum Instellingen	Wijzigen van de datum naar wens.
Tijd modus	Hier kunt u kiezen tussen de 12u of 24u modus.
Datum modus	Hier kunt u kiezen uit de gewenste aantoning: <ul style="list-style-type: none"> - Dag-Maand-Jaar - Maand-Dag-Jaar
Automatische lichtmeting	Hier kunt u ervoor kiezen om de helderheid van het scherm aan te passen. Dit kan zowel handmatig als automatisch.
Volume instellingen	Hier kunt u de hoogte van het volume instellen. Deze stand gaat van 1 – 40.
Alarm instellingen*	Hier kunt u tot wel 5 verschillende alarmen instellen.
Medicatieherinnering *	Hier kunt u eventuele medicatie tijd instellen. Dit kan voor de ochtend, middag en avond.
Fabrieksinstellingen V1.0-20210330	Hier zet u de dementieklok terug naar de fabrieksinstellingen.

**De alarmen en herinneringen kunnen ingesteld worden voor eenmalig gebruik of herhaaldelijk gebruik.*

Opstarten van de klok

Plaats de adapter in het stopcontact en verbind deze vervolgens met de klok. Wacht eventjes met opstarten, zodat de accu de kans krijgt om op te laden. Nu kunt u op de aan/uit knop drukken op de achterkant van de klok. Het opstartscherm zal binnen enkele seconden in beeld verschijnen!

Na het opstartscherm, verschijnt de standaard tijdsaanduiding van de klok.

Installeren van de klok

Het installeren van de klok dat u naar eigen voorkeur van de gebruiker. U kunt simpelweg de instellingen aanpassen naar eigen wens, via het 'MENU' knopje op de afstandsbediening of de achterkant van de klok. Met de knoppen is het mogelijk om in het menu te navigeren en uw opties en instellingen uit te kiezen en veranderen. Als alles is ingesteld, dan kunt u opnieuw op MENU drukken om terug te keren naar de klok.

Taal	Nederlands
-------------	-------------------

Ga naar het menu en selecteer het kopje 'Taal'. U kunt vervolgens met de pijlen uw voorkeur voor de taal bevestigen. De klok heeft de keuze uit de volgende talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Deens, Noors, Fins en Zweeds. Door verder te gaan in het menu wordt de geselecteerde taal bevestigd.

Tijd	<00:00>
-------------	----------------------

Ga naar het kopje 'Tijd' en selecteer deze met de 'OK' knop om de tijd in te stellen naar wens. Door middel van de pijlen achterop de klok, kunt u zowel de minuten als uren accentueren en deze aanpassen. De eerste twee cijfers links bedragen de uren en de twee cijfers rechts bedragen de minuten. U kunt de pijltjes gebruiken voor wijzigingen en deze vervolgens bevestigen met de 'OK' knop.

Datum	< 00 - 00 - 2021 >
--------------	---------------------------------

Ga naar het kopje 'Datum' en selecteer deze met de knop 'OK'. Nu kunt u de gewenste datum instellen. Door de pijltjes op de achterkant van de klok te gebruiken, zal het geselecteerde dag, maand of jaardeel geaccelereerd worden met een witte onderstreep. De datum aanduiding is volgens de Europese richtlijnen, lees: Dag - Maand - Jaar. Na het instellen van de juiste datum, kunt u dit bevestigen met de 'OK' knop.

Tijd modus	12 uur 24 uur
-------------------	------------------------

Via de 'OK' knop kunt u bepalen of u een 12-uurs (AM/PM) weergave wilt of een 24-uursklok weergave. Let op: Het wijzigen van deze modus, kan ervoor zorgen dat er een verschil in dag en nacht weergegeven wordt. Zorg ervoor dat de klok op de 24-uurs modus staat, voordat u de tijd instelt.

Datum modus	< Dag - Maand - Jaar >
--------------------	-------------------------------------

In de instellingen kunt u simpelweg de datum weergave aanpassen. Dit kan met de pijltjes en de volgende weergaven zijn beschikbaar:

Dag - Maand - Jaar

Maand - Dag - Jaar

Jaar - Maand - Dag

Helderheid	< 06 07 >
-------------------	------------------------

Hier kunt u de helderheid van het scherm instellen. Dit gaat simpelweg via de pijltjes. De helderheid kan variëren van , midden of laag. Daarnaast kunt de helderheid ook op automatisch zetten, dan past de helderheid zich automatisch aan door de dag.

Kleur mode	Geel, groen, rood, wit
-------------------	-------------------------------

Hier kunt u de kleuren van het scherm instellen. Dit gaat simpelweg via de pijltjes van de afstandsbediening of via de achterkant van de TOIVO Dementieklok. U kunt kiezen uit de kleuren geel, groen, rood, wit.

Alarm instellingen	< Uit/Aan >
---------------------------	--------------------------

Hier kunt u 5 verschillende alarmen instellen. Druk op 'OK' om naar deze instellingen te gaan en nogmaals op 'OK' om vervolgens de tijd in te stellen. Door middel van de pijlen kunt u de uren of minuten selecteren. Stel eerst de uren in en daarna de minuten. Deze kunt u simpelweg aanpassen met de pijlen en bevestigen met de 'OK' knop. Vervolgens kunt u de gewenste dagen selecteren dat het alarm afgaat. De geprogrammeerde dagen worden in het blauw weergegeven.

Medicijn instellingen	< Uit/Aan >
------------------------------	--------------------------

Hier kunt u 3 verschillende alarmen instellen voor het gebruik van uw medicatie. Zo vergeet de gebruiker niet dat het tijd is voor de dagelijkse medicijn inname. Dit alarm kan zoals alle alarmen ingesteld worden, met meerdere reminders en herhalingen.

Herstel instellingen	< Uit/Aan >
-----------------------------	--------------------------

Hiermee reset u de klok naar de fabrieksinstellingen. Alle gemaakte wijzigingen zullen dan ongedaan gemaakt worden.

Technische Specificaties

Merk	TOIVO
Kleur	Zwart
Talen	Engels; Nederlands; Duits; Frans; Pools
Modelnummer	KL-22
Afmetingen	25,5 x 17 x 2,5 CM
Inch Scherm; Diameter	12 Inch
Materiaal	ABS
Batterij	Lithium-Ion
Garantie	1 Jaar
Voltage/vermogen	AC 100-240V
Geschikt voor	Aflesen datum {dag/maand/jaar}; instellen meerdere alarmen; Instellen medicatie herinnering; Ondersteuning ouderdom; Ondersteuning dementerende; Ondersteuning slechtziende; Kalender; klok; wekker; fotolijstje; speaker
Gewicht	0,4 kg
Stil uurwerk	Ja
Digitaal Display	Ja
Vorm klok	Rechthoek
Radio gestuurde tijdsaanduiding	Niet van toepassing
Waterdicht	Nee

Contact

Voor vragen over een van onze artikelen, ontbrekende onderdelen of ondervindende problemen, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van TOIVO. Wij staan u graag te woord en zullen samen met u er alles aan doen om het probleem te verhelpen.

E: info@toivo.nl

TOIVO | SANBO Group B.V.
Meerheide 105
5521DX Eersel
Noord-Brabant
Nederland

